

### Sterile, isotonische Ringerlösung zur milden und verträglichen Reinigung der Nase.

#### **Liebe Verwenderin, lieber Verwender!**

Sie haben sich für die Siozwo® Nasenspülung entschieden. Hierbei handelt es sich um eine sterile und isotonische Ringerlösung. Die Siozwo® Nasenspülung gehört zu einem hochwertigen, aufeinander abgestimmten Produktprogramm zur Sanierung und Pflege Ihrer Nase. Bitte lesen Sie nachfolgende Information aufmerksam, weil sie wichtige Angaben darüber enthält, was Sie bei der Anwendung von Siozwo® Nasenspülung beachten sollten.

#### **Was ist in Siozwo® Nasenspülung enthalten?**

Siozwo® Nasenspülung enthält sterile, isotonische Ringerlösung – eine Salzlösung, die zusätzlich wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Calcium enthält. Besonders Calcium spielt für die Aufrechterhaltung der Cilientätigkeit eine wichtige Rolle. Cilien sind feine Flimmerhärchen in der Nase. Intakte Cilien sind Voraussetzung für einen reibungslosen Abtransport des Nasenschleims. Sie reagieren sehr empfindlich auf chemische und physikalische Reize und dürfen deshalb nur mit verträglichen Substanzen in Berührung kommen, damit sie ihre volle Funktionsfähigkeit erhalten. Die besondere Zusammensetzung der isotonischen Ringerlösung bietet ein hohes Maß an Verträglichkeit für Schleimhaut und Cilien. Auch auf Konservierungsstoffe und Treibgas wurde selbstverständlich verzichtet.

#### **Wann wird Siozwo® Nasenspülung angewendet?**

**Siozwo® Nasenspülung erzeugt einen Sprühnebel und wird angewendet:**

Zur Reinigung und sanften Spülung der Nasenhöhle, z.B. zum Lösen von Krusten und Schleim, bei vermehrter Luftbelastung (z.B. Staub- und Schmutzbelastung) sowie als begleitende Maßnahme bei Schnupfen und allergischem Schnupfen. Sie eignet sich auch zum Anfeuchten der Nasenschleimhaut bei geringer Luftfeuchtigkeit, z.B. in geheizten oder klimatisierten Räumen. Bei vermehrter Pollen- und Hausstaubbelastung können Überempfindlichkeitsreaktionen reduziert werden. Auch die Anwendung von abschwellenden Medikamenten kann verringert werden. Da die Siozwo® Nasenspülung eine sterile Lösung enthält, ist diese auch zur Anwendung vor und nach Nasenoperationen geeignet.

Siozwo® Nasenspülung ist geeignet für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene.

Durch das spezielle Behältnis/Sprühsystem von Siozwo® Nasenspülung sind weder Konservierungsstoffe noch Treibgas notwendig. Der Sprühkopf wurde entsprechend der natürlichen Form der Nasenöffnung angepasst, um Verletzungen bei der Anwendung zu vermeiden.

#### **Wann darf Siozwo® Nasenspülung nicht angewendet werden?**

Es gibt keine Anwendungsbeschränkungen.

#### **Wann ist bei der Anwendung von Siozwo® Nasenspülung Vorsicht geboten?**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen

Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Nach Nasenoperationen sollte jedoch vor der Anwendung von Siozwo® Nasenspülung der Rat des behandelnden Arztes eingeholt werden.

#### **Darf Siozwo® Nasenspülung während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?**

Es bestehen keine Bedenken gegen die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit.

#### **Wie verwenden Sie Siozwo® Nasenspülung?**

##### **Dosierung:**

Je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen. Bei Kindern sollte die Anwendung durch einen Erwachsenen erfolgen.

##### **Anwendung:**

Siozwo® Nasenspülung funktioniert in jeder Lage. Den Kopf über das Waschbecken halten und leicht nach vorne neigen, sowie seitlich drehen. Sprühöffnung in das obere Nasenloch einführen und Sprühkopf betätigen. Anschließend den Kopf auf die andere Seite drehen und Sprühvorgang am anderen Nasenloch durchführen. Danach Nase schnäuzen oder abwischen. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Aus hygienischen Gründen sollte nach der Anwendung der Sprühkopf mit warmem Wasser gereinigt und trocken gehalten werden. Siozwo® Nasenspülung sollte, um mögliche Infektionen zu vermeiden, nur von jeweils einer Person verwendet werden. Bitte halten Sie sich an die in der Gebrauchsinformation angegebene oder vom Arzt oder Apotheker empfohlene Dosierung.

#### **Wie lange dürfen Sie Siozwo® Nasenspülung anwenden?**

Bei Bedarf kann Siozwo® Nasenspülung ohne Bedenken auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

Siozwo® Nasenspülung darf nur bis zu dem auf dem Behälter bezeichneten Datum verwendet werden.

#### **Welche unerwünschten Nebenwirkungen kann Siozwo® Nasenspülung haben?**

Bisher sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

#### **Was ist ferner zu beachten?**

Nicht über 25 °C lagern und vor Frost schützen!

Behälter steht unter Druck, nicht brennbar.

Behälter vor Sonnenbestrahlung und Temperatur über 50 °C schützen. Nicht für Injektionszwecke! Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Bei nicht-intakter Sprühdose darf Siozwo® Nasenspülung nicht mehr angewendet werden.

#### **Welche Packungen sind erhältlich?**

Siozwo® Nasenspülung Packung zu 100 ml.

Vertrieb:  
Febena Pharma GmbH  
Oskar-Jäger-Str. 115  
D-50825 Köln

Telefon: 0221 / 954477-0 | Telefax: 0221 / 954477-5

E-Mail: [info@febena.de](mailto:info@febena.de) | [www.siozwo.de](http://www.siozwo.de)



Hersteller:  
Aurena Laboratories AB  
Fjärrviksvägen 22  
SE-653 50 Karlstad, Sweden

REF 300351

Medizinprodukt

STERILE R

CE 0413

Siozwo® Nasenspülung ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

Wenn Sie mehr über Siozwo® Nasenspülung wissen möchten, rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Internetseiten unter:  
[www.siozwo.de](http://www.siozwo.de)

**Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach weiteren Produkten aus dem Siozwo®-Programm.**

***Gezielt behandeln – wirksam vorbeugen mit Siozwo®***

### ***Eine intakte Schleimhaut wird seltener krank***

Wer regelmäßig auf eine gesunde Nasenschleimhaut achtet, ist widerstandsfähiger gegen Erkältungsschnupfen oder allergischen Schnupfen. Häufig genügt schon der Aufenthalt in trockener Heizungsluft, in klimatisierten Räumen oder auch ein Langstreckenflug, um die Schleimhaut zu schädigen. Sie sollten deshalb immer auf Pflege und Schutz Ihrer Nase achten. Siozwo® bietet Ihnen ein umfangreiches Programm von milden und verträglichen Produkten zur Pflege und Behandlung von Schnupfen und allergischem Schnupfen an.

### **Siozwo® SAN Nasenspray – mit Dexpanthenol und Meersalz**

Bei trockener Nase, befeuchtet und pflegt, sowie als begleitende Maßnahme bei Reizungen der Nasenschleimhaut z.B. infolge von Heuschnupfen oder Erkältungen.

**Siozwo® PFLEGE** – Balsam mit pflegenden Wirkstoffen für die empfindliche Haut im Bereich der Nasenlöcher. Erholung und Regeneration der trockenen und gereizten Nase.

***Mit Siozwo® immer eine Nasenlänge voraus!***

***Falls Sie mehr über Siozwo® Nasenspülung wissen wollen, schreiben Sie uns:***

Wann wenden Sie Siozwo® Nasenspülung an?\*

- Zur Reinigung und Spülung der Nasenhöhle
- Als begleitende Maßnahme bei Schnupfen
- Zum Anfeuchten der Nasenschleimhaut
- Bei Pollen- und Hausstaubbelastung
- Zur Anwendung vor und nach Nasenoperationen
- Ja, ich möchte gerne mehr zum Siozwo® Produktprogramm wissen

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

Wohnort: \_\_\_\_\_

Geburtstag:\* \_\_\_\_\_

Beruf:\* \_\_\_\_\_

E-Mail:\* \_\_\_\_\_

\* freiwillige Angabe

Sonstiges: \_\_\_\_\_